

artConcept® PLUS

VENEER ÄSTHETIK



OPTIMIERT MIT



artPreOpaque PLUS

Opaker zur Grundierung und Verbesserung des Haftverbundes zwischen **artPrime PLUS** und **artOpaque PLUS**.

EIGENSCHAFTEN

- Optimierter Verbund abgestimmt auf die Komponenten des artConcept® PLUS
- Lichtdurchlässig für optimale Polymerisation
- Zuverlässige Benetzung der Oberfläche - leicht aufzutragen
- Ausgleich von Unterschnitten und mechanischen Retentionen

LIEFERFORM

Opaker 3 g, REF 1010705

artPreOpaque PLUS verbessert die chemische Verbindung zwischen Verblendoberflächen in Ergänzung der Komponenten **artPrime PLUS** und **artOpaque PLUS**.

VORTEILE

- ✓ Deutlich verbesserter Haftverbund
- ✓ Einfach anzuwenden
- ✓ Optimale Vorbereitung von Verblendoberflächen bei Verwendung des artConcept® PLUS
- ✓ Einsetzbar auf Legierungsoberflächen und PEEK

ANLEITUNG ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

(Bitte wenden)

LIEFERFORMEN

- ✓ TESTset
- ✓ MINIsset
- ✓ STARTset
- ✓ Einzelkomponenten
- ✓ Display

artConcept® PLUS



STEP BY STEP



Detaillierte Setkonfigurationen entnehmen Sie bitte unserem Bestellformular
REF 1092378

Arbeitsanleitung
REF 1092370

► Auftragen von

artPreOpaque PLUS und artOpaque PLUS



STEP 1:

artPrime PLUS auftragen

artPrime PLUS zeitnah, nach dem Abstrahlen mit 50 bis 110 μm und 2 -3 bar, satt auftragen und ablüften lassen.



Tipp: Längeres Abwarten bis zum Auftragen des artPreOpacuer PLUS verringert die Haftwerte, zügiges Arbeiten nach dem Ablüften verbessert die Haftwerte.



STEP 2:

artPreOpaque PLUS auftragen



Durch seine fließfähige Konsistenz gelangt der artPreOpaque PLUS bereits beim ersten Auftragen in alle Retentionsbereiche des Gerüsts und ist somit Bestandteil des Verbundsystems. Die Lichtdurchlässigkeit des transparenten Materials sorgt selbst bei Unterschnitten für hervorragende Polymerisationseigenschaften.



STEP 3:

artOpaque PLUS auftragen



Erste Schicht des artOpacuer PLUS auftragen, hiermit ist das Gerüst gleichmäßig, entsprechend der gewünschten Farbe, grundiert.

Wichtig: Jede aufgetragene Schicht muss im Lichtpolymerisationsgerät ausgehärtet werden, Polymerisationszeiten hängen vom jeweiligen Gerät ab. Das Lichtspektrum sollte zwischen 470 -490 nm liegen.



STEP 4:

artOpaque PLUS wiederholt auftragen



Zweite Schicht artOpaque PLUS auftragen, hiermit wird das Gerüst farblich komplett abgedeckt.

Tipp: Jeder Auftrag wird dünn vorgenommen, da dadurch das Auspolymerisieren des Opakers begünstigt wird.



Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformationen zu den einzelnen Produkten.

Merz Dental GmbH

Kieferweg 1 24321 Lütjenburg, Germany

Tel + 49 (0) 4381 / 403-0

Fax + 49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485

CE 0482

MERZ
DENTAL

08/2020-100/0861