

projectAR Installationsanweisung



Stand 11/2019

Seite 1 von 8


Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der **projectAR** Multimediabrille entschieden haben. Für eine erfolgreiche Lizenzierung, Installation und der Verbindung des Produktes mit Ihrem Intraoralscanner, bitten wir Sie die folgenden Informationen zu beachten.

Registrieren Sie sich auf der Website www.my-projectAR.com und geben Sie Ihren Lizenzschlüssel ein.

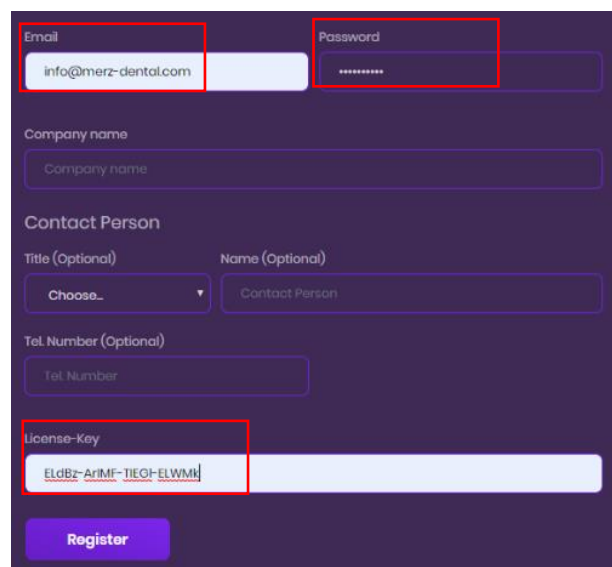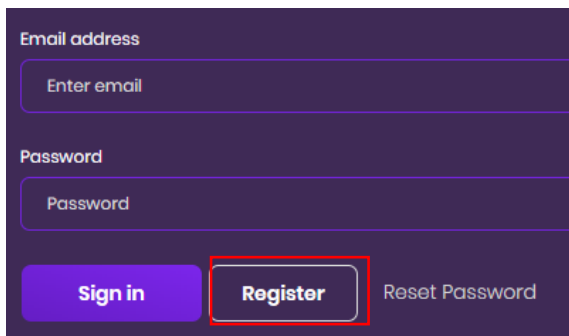

Ihr
Lizenzschlüssel
ist nun aktiviert
und Sie haben
Zugang zu dem
projectAR-
Portal.

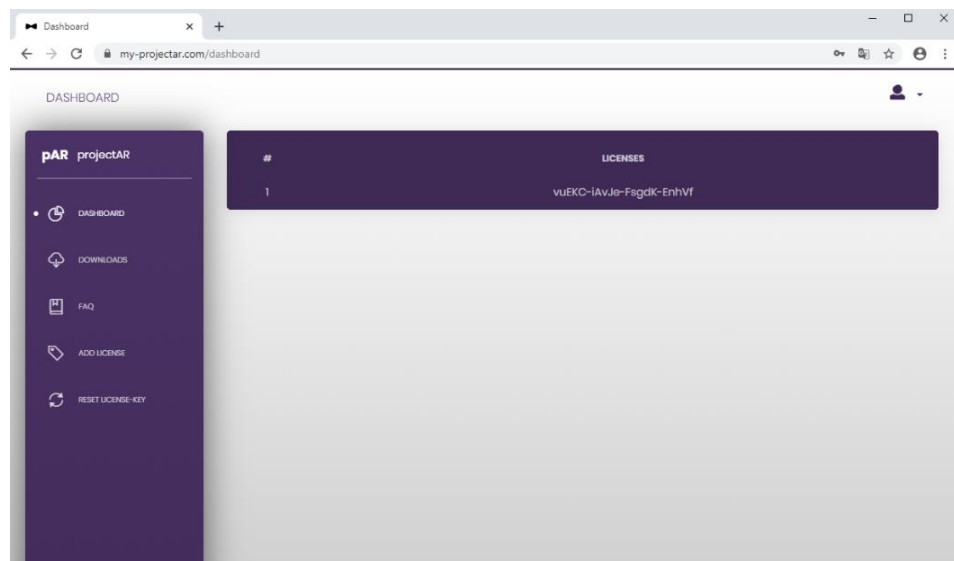


projectAR Installationsanweisung


Stand 11/2019

Seite 2 von 8

Gehen Sie auf >>DOWNLOADS >>Download

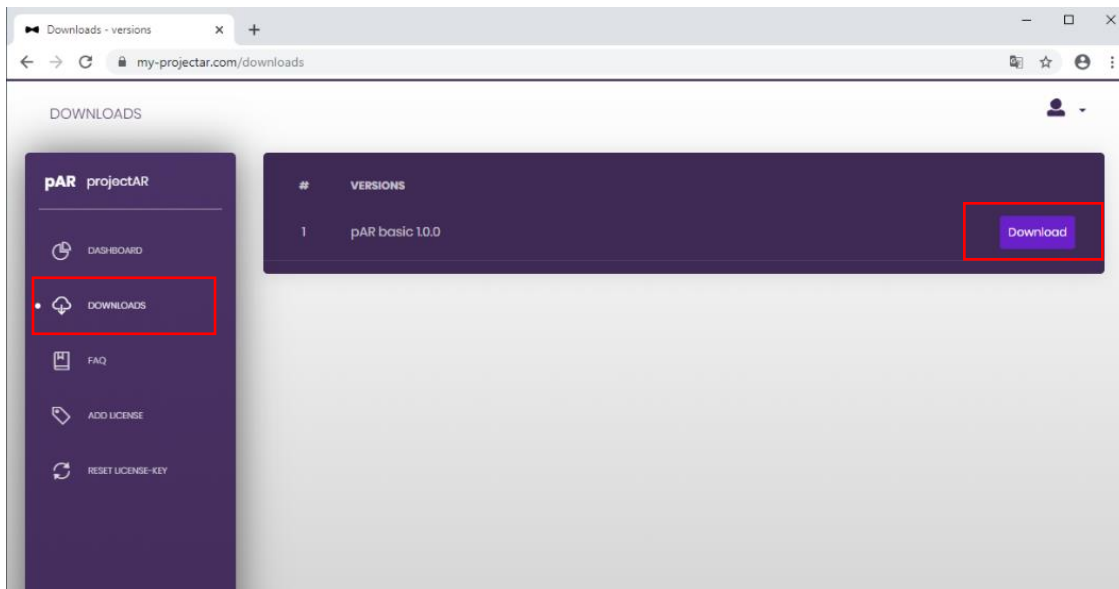

Laden Sie die Datei **Bonjour** auf Ihren Computer / Ihr CAD-System herunter.

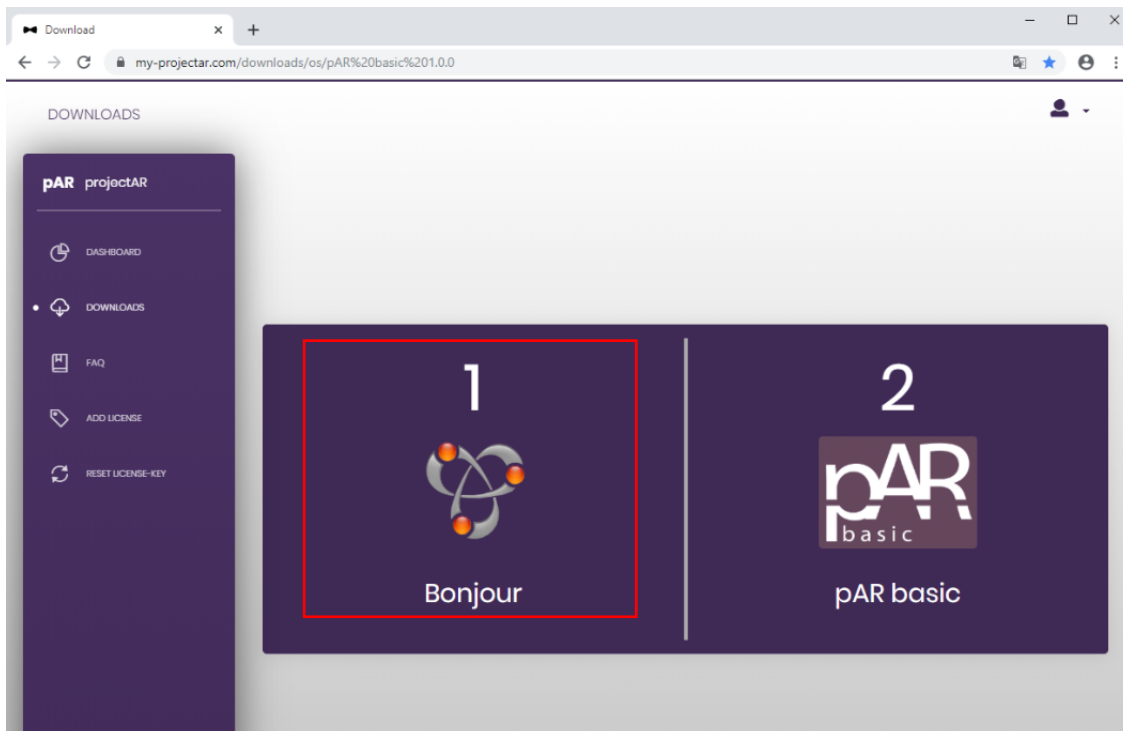

projectAR Installationsanweisung

Stand 11/2019

Seite 3 von 8

Folgen Sie dem Installationsassistenten.

Willkommen zur Bonjour-Druckdienste-Installation

Sie werden durch alle Schritte geführt, die für die Installation von Bonjour-Druckdienste erforderlich sind. Klicken Sie auf „Fortfahren“, um zu beginnen.

2.0.2.0 x64

< Zurück Weiter > Abbrechen

Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie die folgende Lizenzvereinbarung aufmerksam durch.

Deutsch

**APPLE INC.
SOFTWARELIZENZVERTRAG FÜR DIE BONJOUR
DRUCKDIENSTE FÜR WINDOWS**

BITTE LESEN SIE DIESEN SOFTWARELIZENZVERTRAG („LIZENZ“) SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE APPLE SOFTWARE IN BETRIEB NEHMEN. INDEM SIE

Ich lehne die Bestimmungen der Lizenzvereinbarung ab

Ich akzeptiere die Bestimmungen der Lizenzvereinbarung

< Zurück Weiter > Abbrechen

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen.

Über Bonjour-Druckerdienste für Windows

Mit den Bonjour-Druckerdiensten für Windows können Sie von Ihrem Windows-Computer aus mit dem Bonjour-Druckerassistenten Drucker mit Bonjour-Unterstützung in Ihrer Nähe finden und konfigurieren.

Systemvoraussetzungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Installationsoptionen

Wählen Sie den Ordner, in dem die Dateien von Bonjour-Druckdienste installiert werden sollen, und wählen Sie die Installationsoptionen.

Desktopverknüpfung für Bonjour-Druckerassistent erstellen

Bonjour-Druckdienste und weitere Apple-Software automatisch aktualisieren

Wählen Sie diese Option, wenn Apple Software Update automatisch nach Updates suchen soll.

Zielordner

C:\Program Files\Bonjour Print Services\

Ändern...

< Zurück Installieren Abbrechen

Installation erfolgreich.

Bonjour-Druckdienste wurde erfolgreich auf Ihrem Computer installiert.

Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation zu beenden.


< Zurück Fertigstellen Abbrechen

projectAR Installationsanweisung

Stand 11/2019

Seite 4 von 8


Laden Sie anschließend die Datei **pAR basic** herunter und installieren Sie diese.

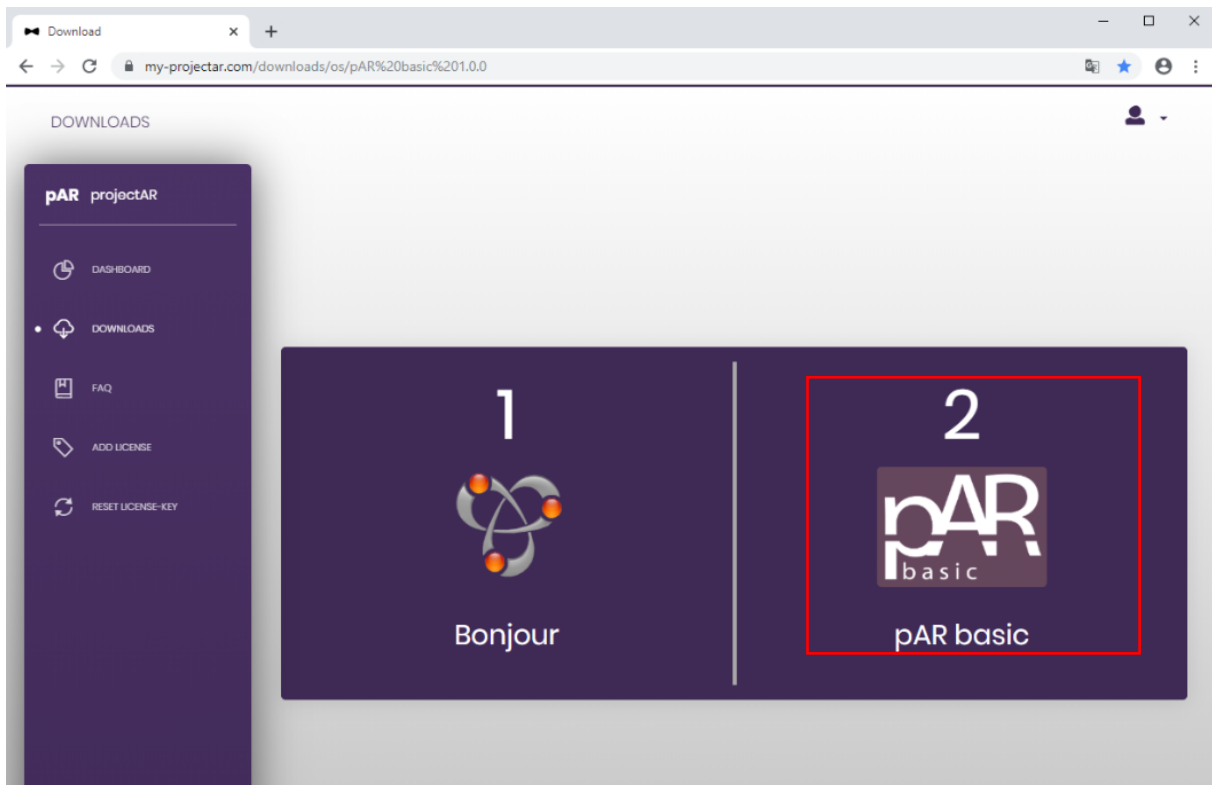


projectAR Installationsanweisung

Stand 11/2019

Seite 5 von 8

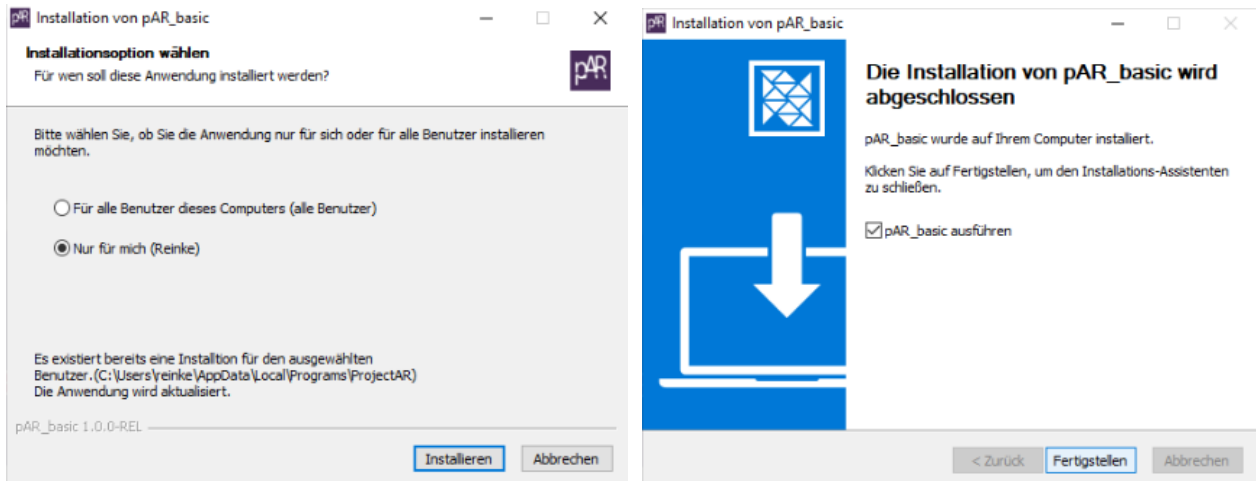



Starten Sie die **pAR basic** Software und folgen Sie dem Einrichtungsassistenten. Beachten Sie, dass Sie Ihren Lizenzschlüssel in der Software erneut eingeben müssen.

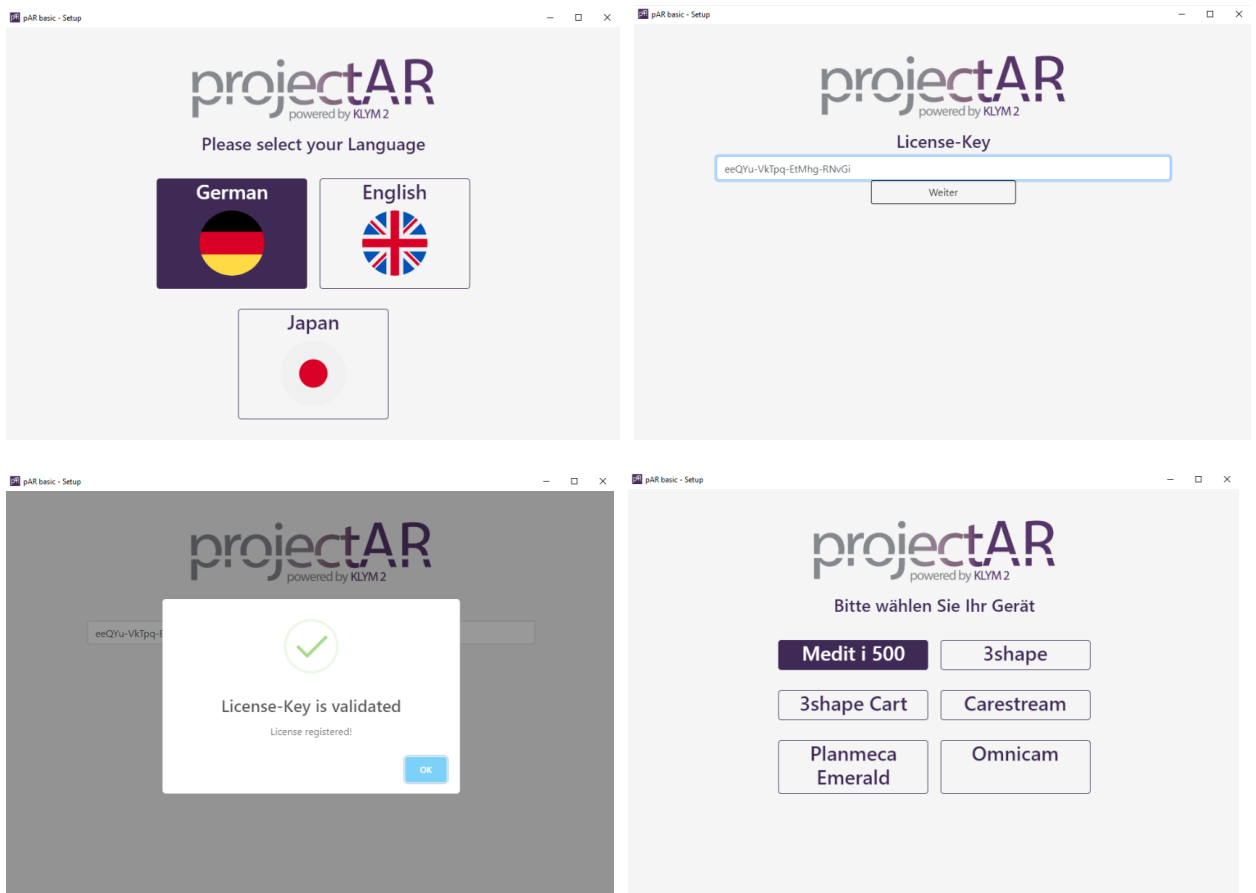

projectAR Installationsanweisung

Stand 11/2019

Seite 6 von 8

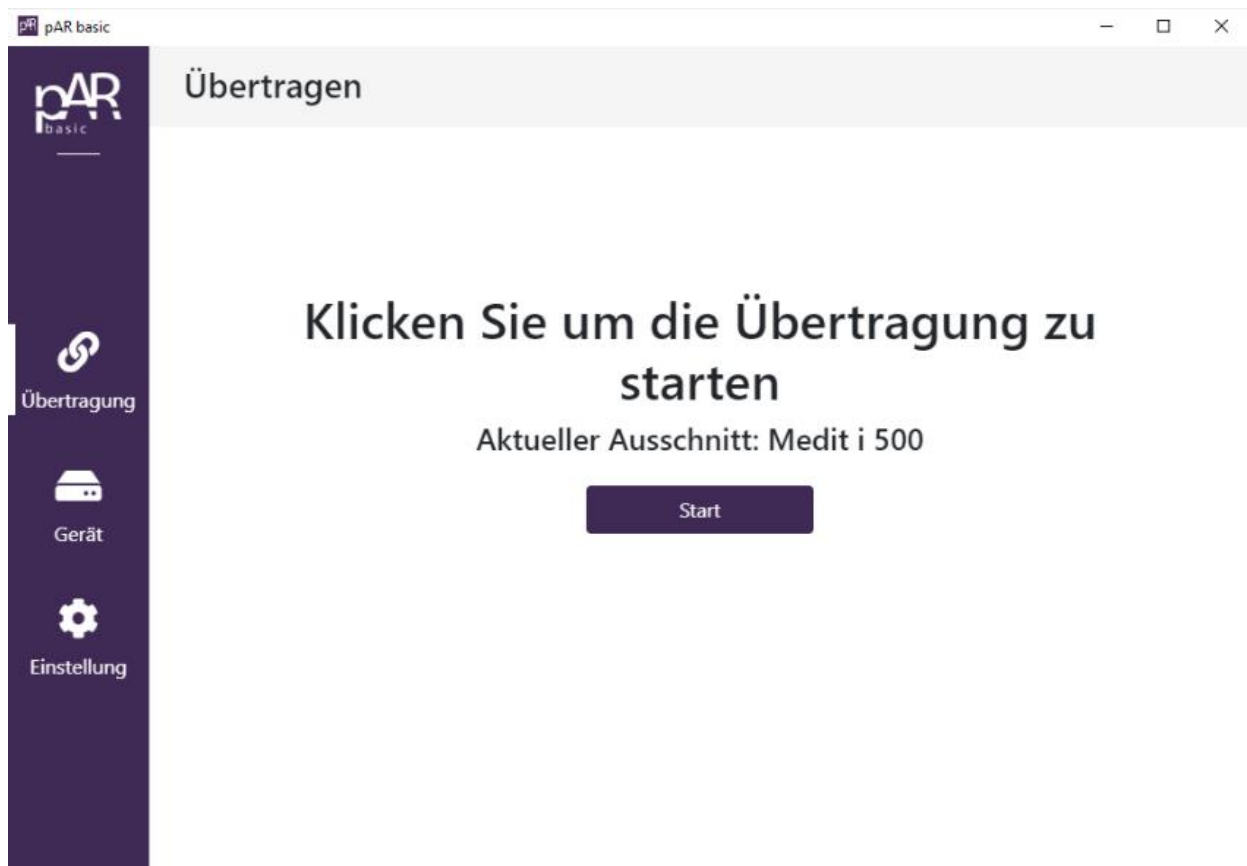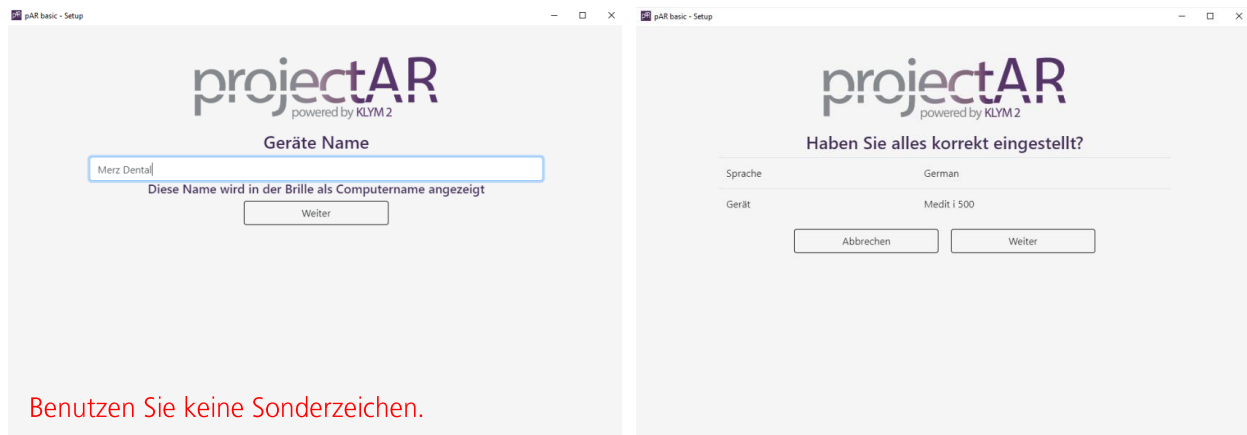




projectAR Installationsanweisung

Stand 11/2019




Seite 7 von 8

Verbinden Sie nun die Brille und Ihren Computer / Ihr CAD System mit dem gleichen WLAN. Stellen Sie Ihr Netzwerk auf „privat“ ein und achten Sie auf eine gute Signalstärke und stabile Verbindung.

Einstellungen Computer / CAD-System:

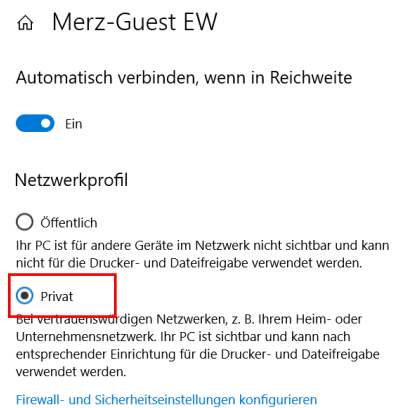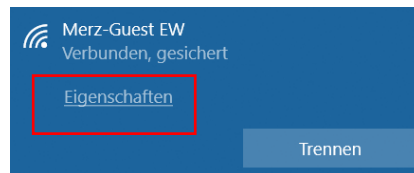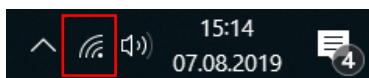

Einstellungen projectAR Multimediabrille:

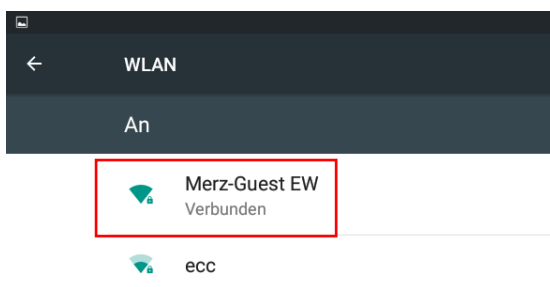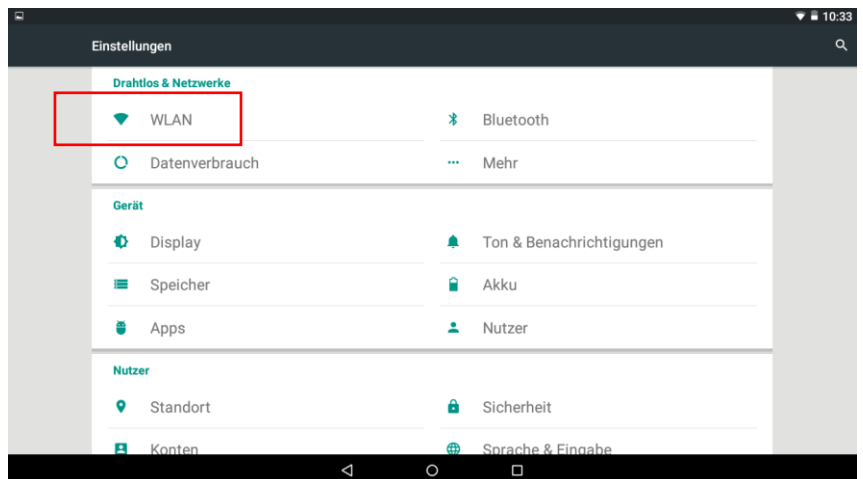
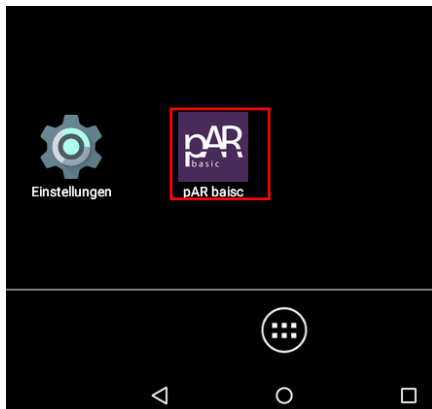


projectAR Installationsanweisung


Stand 11/2019

Seite 8 von 8

Starten Sie auf der Brille die **projectAR** App und wählen Sie Ihr bei der Einrichtung der Software angegebenes Gerät (Computernamen) aus.

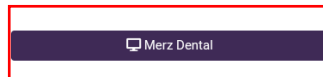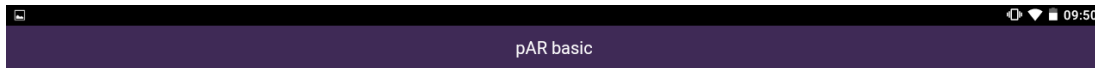

Gehen Sie anschließend in der Software auf Ihrem Computer / CAD-System auf „Start“, um die Übertragung zu starten.

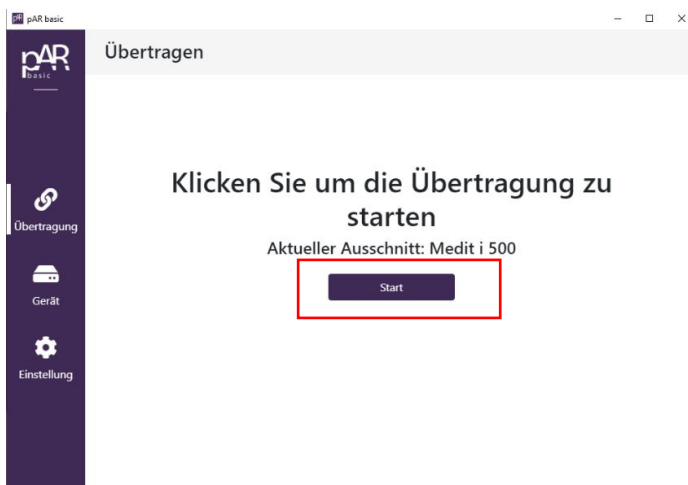

Die Installation und Einrichtung der **projectAR** Multimediabrille ist nun abgeschlossen.

Unter den **häufig gestellten Fragen (FAQ)** finden Sie hoffentlich auch für Ihre Frage eine Antwort. Sollte das nicht der Fall sein, so zögern Sie bitte nicht, sich direkt bei uns zu melden.