

CronMix® temcem

Temporärer Befestigungszement auf Zinkoxid-Basis, eugenolfrei
für Kronen, Brücken, Inlays und Onlays



Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

Zusammensetzung

CronMix® temcem besteht aus Basis- und Katalysatorpaste im Volumen-Verhältnis 1:1. CronMix® temcem enthält Zinkoxid, Naturharze, Paraffin, Fettsäuren und in geringen Mengen Stabilisatoren und Additive.

Indikationen

CronMix® temcem ist geeignet zur temporären Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays, besonders wenn die endgültige Versorgung adhäsiv befestigt werden soll.

Nebenwirkungen

In Einzelfällen ist nicht auszuschließen, dass Bestandteile von CronMix® temcem bei prädisponierten Personen gewisse lokale Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergie, Kontaktdermatitis) hervorrufen. Sollte daher eine Allergie gegen Bestandteile von CronMix® temcem bekannt sein, ist auf die Anwendung von CronMix® temcem zu verzichten.

Dosierung und Art der Anwendung

VORBEREITUNG DER PRÄPARATION

Bei gegebener Indikation, z. B. bei tiefen Kavitäten, ist ein Pulpaschutz vor dem Eingliedern des Provisoriums zu applizieren.

REINIGUNG DER PRÄPARATION

Kurz vor dem Zementieren sind die präparierten Zahnstümpfe oder die Kavitätenoberflächen mit Wasser zu reinigen. Chemische Rückstände in der Kavität oder auf dem Zahnstumpf sind vor dem Zementieren zu entfernen.

VORBEREITUNG DES PROVISORIUMS

Das Provisorium wird vor der Applikation von CronMix® temcem trocken geblasen.

DOSIERUNG / MISCHUNG

CronMix® temcem wird automatisch dosiert und gemischt und kann direkt in das Provisorium appliziert werden. Vor dem Aufsetzen der Mischkanüle ist der braune Verschluss der Doppelkammerspritze zu entfernen, indem er um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Der braune Verschluss wird dann entsorgt. Beim Aufsetzen der Mischkanüle ist zu beachten, dass die Führungsrielen an der Doppelkammerspritze und der Mischkanüle übereinstimmen. Die Mischkanüle wird auf der Doppelkammerspritze fixiert, indem sie um 90° im Uhrzeigersinn gedreht wird. CronMix® temcem Basis- und Katalysatorpaste sind in der Doppelkammerspritze gebrauchsfertig dosiert und werden beim Ausbringen in der Kanüle gemischt. CronMix® temcem kann so direkt in das Provisorium appliziert werden. **Wichtig:** Die gebrauchte Mischkanüle ist bis zum nächsten Gebrauch als Verschluss auf der Doppelkammerspritze zu belassen.

APPLIKATION VON CRONMIX® TEMCEM / EINSETZEN DES PROVISORIUMS

Vor wiederholtem Zementieren eines Provisoriums sind eventuelle Rückstände im Inneren durch Schleifen oder Sandstrahlen zu entfernen.

Auf die Innenseite des Provisoriums oder in die Kavität wird eine dünne Schicht CronMix® temcem aufgetragen. Das Provisorium wird anschließend auf den trockenen, präparierten Zähnen mit leichtem Druck in Position gebracht. Anschließend den Patienten langsam zubeißen lassen (evtl. Watterolle verwenden) und die Okklusion überprüfen.

Nach ca. 5 bis 6 Minuten können die Zementüberschüsse mit einem geeigneten Instrument (Sonde) in großen Stücken entfernt werden.

Interdentale Überschüsse sind vorsichtig mit Zahnseide zu entfernen. Durch seine helle Farbe ist das Material gut von der Zahnschmelze zu unterscheiden.

Die Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur beträgt ca. 1 Minute.

Die vollständige Aushärtung bei Körpertemperatur (im Mund) wird nach ca. 7 Minuten erreicht.

Besondere Hinweise

- Die Lagerung von CronMix® temcem soll bei Raumtemperatur (15-25 °C) erfolgen. Nicht über 25 °C lagern!
- CronMix® temcem ist nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr zu verwenden.
- Die Chargennummer (LOT-Nr.) sollte bei jedem Vorgang, der eine Identifikation des Materials verlangt, angegeben werden.
- Hautkontakt mit der Paste vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Produkt enthält Kolophonium
- Merz Dental Medizinprodukte werden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Für die Anwendung der von uns gelieferten Produkte sind unsere wörtlichen und/oder schriftlichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach derzeit bestem Wissen gegeben. Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien jedoch nicht davon, das betreffende Produkt auf seine Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck zu prüfen. Da die Anwendung der Merz Dental Produkte ohne unsere Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in der Verantwortung des Anwenders. Merz Dental gewährleistet die Qualität des betreffenden Merz Dental Medizinproduktes entsprechend bestehender Normen sowie entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen festgelegten Standards.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

Eigenschaften

CronMix® temcem ist ein leicht zu verarbeitender, provisorischer, eugenolfreier Befestigungszement auf Zinkoxidbasis, der die Aushärtung von Füllungs- und Befestigungsmaterialien auf Kunststoffbasis nicht beeinflusst. CronMix® temcem fließt leicht und gestattet so ein einwandfreies, exaktes Einsetzen des Provisoriums. Die optimierten Materialeigenschaften von CronMix® temcem sorgen dabei für einen sicheren Halt des Provisoriums bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit. CronMix® temcem wird in der Doppelspritze automatisch gemischt und direkt auf die Restauration bzw. in die Kavität appliziert. Eine manuelle Anmischung der beiden Komponenten ist nicht mehr erforderlich.

Die Produkteigenschaften basieren auf Einhaltung und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung.

Klassifizierung

CronMix® temcem erfüllt die Anforderungen nach ISO 3107:2011, Typ 1

Liefereinheiten

2 Doppelkammerspritzen à 12 g Paste,
10 kurze Mischkanülen

REF

1060517

Zubehör

50 Kurze Mischkanülen

1060518

Stand der Information 2017-12



Merz Dental GmbH

Kieferweg 1 24321 Lütjenburg, Germany

Tel + 49 (0) 4381 / 403-0

Fax + 49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485

CE 0482