


PeriCare®

Zahnfleischgel mit 0,4 % Hyaluronsäure

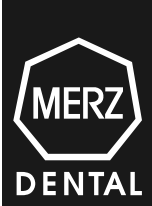

Bitte lesen Sie die Informationen vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch.

PeriCare® Zahnfleischgel ist ein Gel mit einzigartiger Formulierung für die orale Anwendung, das Pflanzenextrakte und Hyaluronsäure enthält; die spezielle Formulierung unterstützt die Behandlung sowie die Heilung und Schmerzlinderung in Fällen von Aphthen und Entzündungen im Mundraum.

PeriCare® Zahnfleischgel bildet eine schützende Schicht auf dem verletzten Bereich, sodass er bedeckt und vor Einflüssen aus dem Mundraum geschützt ist. Diese Schicht schützt exponierte Nervenendigungen im Mund und mindert die Schmerzempfindung. Das im Gel enthaltene Menthol kühlt den Bereich, auf dem das Gel aufgetragen wird, und sorgt für eine rasche lokale Betäubungswirkung und Linderung der Schmerzen, die mit der Entzündung verbunden sind. Die Hyaluronsäure trägt zum Schutz des Zahnfleischs bei, und die einzigartige Formulierung des Gels ist dank des angenehmen Geschmacks und der Konsistenz besonders für die Anwendung im Mundraum geeignet.

Zusammensetzung

Wasser, Glycerin, Sorbitol, Natrium-Carboxymethylcellulose, Xylitol, Benzylalkohol, Trinatriumcitrat, Allantoin, Natriumhyaluronat, Kaliumsorbat, Ratanhia-(Krameria-triandra-)Extrakt, Calendula-officinalis-Extrakt, Aloe-vera-Extrakt, Zitronensäure, Menthol, Xanthan, Saccharin (Natriumsalz), Brillantblau FCF (E133), Riboflavin (E101i).

Anwendungsgebiete

PeriCare® Zahnfleischgel ist für das Auftragen auf das Zahnfleisch und die Mundschleimhaut vorgesehen und dient als Hilfsmittel zur Behandlung, Heilung und Linderung von Schmerzen, Empfindlichkeit und Verletzungen aufgrund von Aphthen und/oder Entzündungen im Mund und des Zahnfleischs, die infolge des Tragens von Prothesen oder Zahnspangen bzw. nach zahnmedizinischen Behandlungen usw. auftreten.

PeriCare® Zahnfleischgel ist für die Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab einem Alter von 6 Jahren geeignet.

Wann sollten Sie PeriCare® Zahnfleischgel nicht anwenden?

- Wenden Sie PeriCare® Zahnfleischgel nicht an, wenn Sie empfindlich auf einen seiner Inhaltsstoffe reagieren.
- PeriCare® Zahnfleischgel nicht bei bestehender Blutung oder eitriger Entzündung im Mund anwenden.

Wenden Sie PeriCare® Zahnfleischgel in den folgenden Fällen nicht an, ohne einen Arzt zurate zu ziehen:

- Wenden Sie PeriCare® Zahnfleischgel nicht über einen längeren Zeitraum an, ohne einen Arzt zurate zu ziehen.
- Wenden Sie PeriCare® Zahnfleischgel nicht ohne ärztliche Beratung an, wenn Sie unter wiederholten oder unerklärlichen Blutungen im Mund oder am Zahnfleisch oder unter einer Munderkrankung leiden oder wenn bei Ihnen eine Blutgerinnungsstörung vorliegt.
- Wenden Sie PeriCare® Zahnfleischgel nicht an, ohne einen Arzt zurate zu ziehen, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn Sie empfindlich auf PeriCare® Zahnfleischgel reagieren, oder auf irgendein anderes Medikament oder eine Substanz, sollten Sie Ihren Arzt vor der Anwendung von PeriCare® Zahnfleischgel darüber informieren.

Wechselwirkungen zwischen PeriCare® Zahnfleischgel und anderen Medikamenten und / oder Präparaten

Wenn Sie ein anderes Medikament oder Produkt einnehmen, wenn Sie gerade erst die Behandlung mit einem anderen – auch einem rezeptfreien – Medikament oder Produkt, beendet haben, sollten Sie Ihren Arzt darüber informieren, um eine Gefährdung oder eine mangelhafte Wirksamkeit zu vermeiden, die aus Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Produkten resultieren könnte.

Nebenwirkungen

Zusätzlich zu der gewünschten Wirkung von PeriCare® Zahnfleischgel können bei dessen Anwendung vorübergehend unerwünschte Wirkungen, z. B. Reizung, stechendes oder Kältegefühl im Mund, insbesondere unmittelbar nach Auftragen des Gels im Mund, auftreten. Diese Wirkungen klingen nach Gewöhnung an PeriCare® Zahnfleischgel schnell wieder ab. Falls diese Nebenwirkungen länger andauern, falls Sie eine andere als die in dieser Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen bei sich bemerken oder sich Ihr allgemeiner Gesundheitszustand verändert: Beenden Sie die Anwendung von PeriCare® Zahnfleischgel und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Gebrauchsanweisung und Dosierung

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab einem Alter von 6 Jahren. Das Gel vorsichtig als dünne Schicht auf dem entzündeten Bereich, der Aphthe oder Entzündung auf der Mundschleimhaut oder dem Zahnfleisch verteilen und dabei die Stelle sanft massieren. Um das Verteilen zu erleichtern, können Sie entweder einen sauberen Finger oder ein Wattestäbchen zu Hilfe nehmen.

Es wird empfohlen, nur eine kleine Menge aufzutragen (in der Regel reichen 1–2 Tropfen), um die Aphthe bzw. entzündete Stelle vollständig zu bedecken. Nach dem Auftragen den verletzten Bereich für mindestens 2 Minuten nicht mit der Zunge berühren, damit sich die Schutzschicht ausbilden kann. Die Anwendung alle 3–4 Stunden oder bei Bedarf wiederholen, aber nicht häufiger als 6-mal täglich. Nach Auftragen des Gels mindestens eine Stunde lang nicht essen oder trinken, damit es einwirken kann.

Was Sie tun können, um den Erfolg der Behandlung zu unterstützen?

Während der Behandlung mit PeriCare® Zahnfleischgel empfiehlt es sich, keine Nahrungsmittel oder Getränke zu sich zu nehmen, die stark gewürzt, salzig, sehr heiß oder grobkörnig/-faserig sind (beispielsweise Salzbrezeln), um eine Verletzung oder Reizung des entzündeten Bereichs zu vermeiden.

Besondere Hinweise

- Die Anwendung von PeriCare® Zahnfleischgel bei Kindern, die jünger sind als 6 Jahre, darf nur nach ärztlicher Empfehlung und durch einen Erwachsenen und unter dessen Beobachtung erfolgen.
- PeriCare® Zahnfleischgel nicht essen bzw. schlucken! Zum Auftragen auf das Zahnfleisch und die Mundschleimhaut. PeriCare® Zahnfleischgel ist nicht zum Verzehr oder Verschlucken vorgesehen. Allerdings kann es nach dem Auftragen im Mund entsprechend der Gebrauchsanweisung zum Verschlucken des Gels kommen – dies ist unbedenklich.
- Nicht an den Augen anwenden. Berührung mit den Augen vermeiden. Im Falle eines Kontakts des Gels mit den Augen: Einige Minuten unter laufendem Wasser ausspülen. In ärztliche Behandlung begeben, falls erforderlich.
- Wenn es zu einer neuen Reizung oder Empfindlichkeitsreaktion im Mund kommt: Beenden Sie die Anwendung mit PeriCare® Zahnfleischgel und suchen Sie einen Arzt auf.
- Falls sich die Entzündung nicht innerhalb weniger Tage bessert, suchen Sie einen Arzt auf.

Vergiftungen vermeiden! PeriCare® Zahnfleischgel sollte an einem verschlossenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Babys aufbewahrt werden, um Vergiftungen zu vermeiden. Falls es zu einer Überdosierung gekommen ist, oder ein Kind oder eine erwachsene Person versehentlich eine große Menge des Gels (die den in dieser Gebrauchsinformation angegebenen Bereich überschreitet) verschluckt hat, suchen Sie umgehend die Notaufnahme eines Krankenhauses auf und legen Sie dort die Packungsbeilage vor. Lösen Sie bei der betroffenen Person kein Erbrechen aus, es sei denn Sie werden dazu ausdrücklich von einem Arzt angewiesen!

PeriCare® Zahnfleischgel nicht im Dunklen anwenden. Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung von PeriCare® Zahnfleischgel die Kennzeichnung und Gebrauchsinformation. Setzen Sie Ihre Brille auf, sofern Sie sie benötigen.

Aufbewahrung

An einem kühlen Ort (unter 25 °C) aufbewahren. Direkte Hitzeeinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden. PeriCare® Zahnfleischgel in der Originalverpackung aufbewahren. Nach jedem Gebrauch gut verschließen. Für Kinder und Babys unzugänglich aufbewahren. PeriCare® Zahnfleischgel nach Ablauf des Verfalldatums, das auf der Verpackung aufgedruckt ist, nicht weiter verwenden.

Verwendungsdauer nach erstmaligem Öffnen

Nach erstmaligem Öffnen kann PeriCare® Zahnfleischgel maximal 6 Monate verwendet werden. In keinem Fall über das auf der Verpackung aufgedruckte Verfallsdatum hinaus verwenden.

Zuletzt überarbeitet: 20.05.2021



Tree of Life Pharma Ltd. (for Prudentix Ltd.)
1 Bat-Sheva Street, POB 799, Lod 7110604, Israel

EC REP MedNet EC-REP GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

Vertrieb



DENTAL

Merz Dental GmbH

Kieferweg 1, 24321 Lütjenburg, Germany

Tel + 49 (0) 4381 / 403-0

Fax + 49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485

