

Wax Spacer

▶ patented by
Prof. Godt & ZT Schweizer

exclusively for MERZ DENTAL



Wax Spacer

Intraorales diagnostisches Set-up zur neurozentrischen Registrierung.

Der Wax Spacer ist ein physiologisches Registrat zur Ermittlung vordefinierter Bisshöhen.

Mit ihm lässt sich die genaue Position des Unterkiefers zum Oberkiefer abstandsgenau erfassen.

Die in den Wachswall eingearbeitete bissfeste Einlage (Spacer) gewährleistet bereits bei der Kieferrelationsbestimmung die Erfassung der angestrebten Bisserrhöhung und einen gleichbleibenden interokklusalen Abstand. Damit bestimmt der Patient selbst die Lagebeziehung in der transversalen und sagittalen Relation beider Kiefer in der vorgesehenen Bisshöhe.

Indikationen /Anwendungsbereiche


- Okklusionsschienen
- Adjustierte Aufbissschienen
- Bisshebungsschienen
- Anwendung in der Schlaftherapie
- Kieferorthopädische Geräte

Durch den Spacer wird bei der Bissnahme von bezahnten und prothetisch versorgten Kiefern gewährleistet, dass der Patient nicht bis zum Schlussbiss zusammenbeißen kann, sondern nur bis zum eingebauten Stopp (Spacer). Ein Höcker-Höckerkontakt wird dabei ausgeschlossen.


Eigenschaften & Vorteile

- Definierte Bisshöhe
- Einfaches Handling
- Gleichbleibende Ergebnisse
- Definierte Zielposition des Unterkiefers
- Visuelle Kontrolle der Einbisstiefe, mittels Farbumschlag

Frühkontakte werden durch den Spacer ausgeschlossen. Auf diese Weise wird die Höcker-Fossa-Beziehung unter Berücksichtigung des diskokondylären Komplexes bei Einhaltung der definierten Höhe ermittelt.

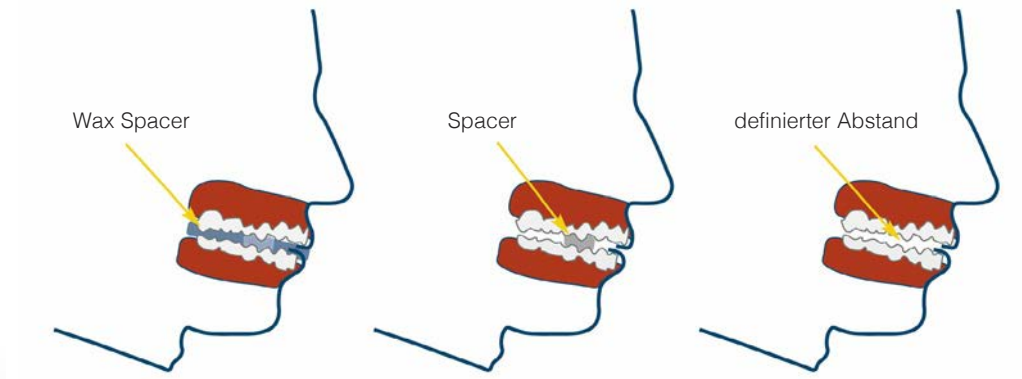


Wax Spacer

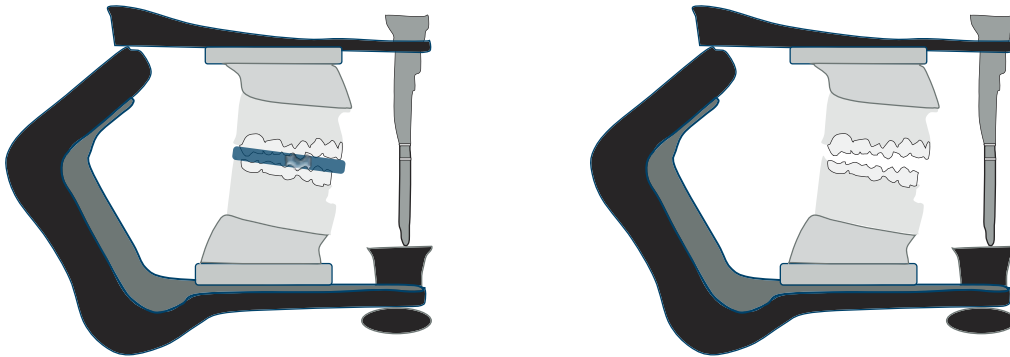


Wax Spacer nach Prof. Godt & ZT Schweizer

- Physiologisches Bissregistrat für Schienentherapie, Schlafmedizin und KFO zur Ermittlung des interokklusalen Abstands mit definierter Bisshöhe (1 mm, 2 mm, 3 mm).
- Mit dem Wax Spacer wird ohne aufwendige Vermessung der Kiefergelenkrotation eine definierte Bisserrhöhung ermittelt.


Position der bissfesten Einlage (Spacer)

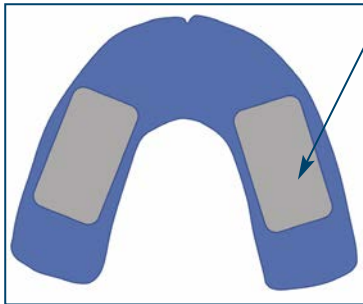

Dunkelblau 1 mm
Höhe Wachswall: ca. 7 mm

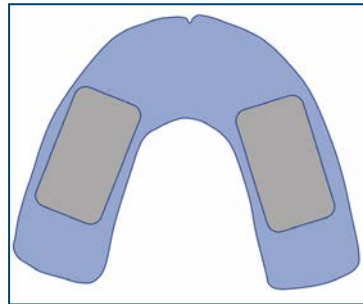

Mittelblau 2 mm
Höhe Wachswall: ca. 8 mm

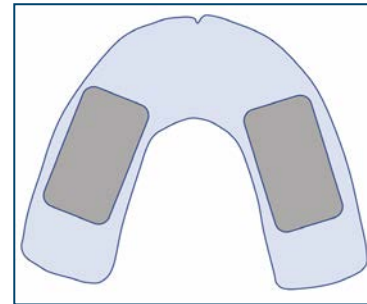

Hellblau 3 mm
Höhe Wachswall: ca. 9 mm




- Die in einen Wachswall eingearbeitete bissfeste Einlage (Spacer) gewährleistet beim Zusammenbeißen einen gleichbleibenden interokklusalen Abstand.

Wax Spacer

- Für unterschiedliche gewünschte Höhen gibt es den Wax Spacer in verschiedenen Stärken (farblich kodiert). So kann eine genaue Positionierung des Unterkiefers in der zu erreichenden therapeutischen Position sicher gestellt werden.
- Der Wax Spacer ist ein verlässliches physiologisches Registrat, um die Kiefergelenkposition, bei unterschiedlichen Abständen der Zahnreihen zueinander, zu registrieren.

Lieferformen

REF

- 20 x  **1 mm** Höhe Wachswall: ca. 7 mm 1030230
- 20 x  **2 mm** Höhe Wachswall: ca. 8 mm 1030231
- 20 x  **3 mm** Höhe Wachswall: ca. 9 mm 1030232



Wax Spacer



Merz Dental GmbH Kieferweg 1 24321 Lütjenburg, Germany Tel +49 (0) 4381 / 403-0 info@merz-dental.de

www.merz-dental.de

1092438/2023-03