

PeriCare®

Periodontal Paste



Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

PeriCare® Periodontal Paste ist eine einfach anzuwendende, gebrauchsfertige ölige Calciumhydroxid-Suspension. Durch die resultierende alkalische Umgebung und die mechanische Barrierewirkung unterstützt PeriCare® Periodontal Paste eine schnelle und für den Patienten schonende Wundheilung und lindert dadurch Symptome wie Schmerzen, Ödeme und Entzündungen nach parodontalen Eingriffen. PeriCare® Periodontal Paste könnte als indikationsbedingte Alternative für Corticoide und Antibiotika, auch Chlorhexidin betrachtet werden. Im Gegensatz zu Corticoiden und Antibiotika hat die PeriCare® Periodontal Paste ausschließlich physikalische Eigenschaften, die die natürliche Geweberegeneration fördern.

PeriCare® Periodontal Paste unterstützt:

- die natürliche Geweberegeneration nach traumatischen Ereignissen
- die anti-ödematösen und anti-inflammatorischen Vorgänge

Zusammensetzung

PeriCare® Periodontal Paste enthält $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in pflanzlicher Ölmischung (Jojoba-Öl)

Indikation

- Parodontale Defekte

Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden. In Einzelfällen ist nicht auszuschließen, dass Bestandteile von PeriCare® Periodontal Paste bei prädisponierten Personen gewisse lokale Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergie, Kontaktdermatitis) hervorrufen. Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen sollte PeriCare® Periodontal Paste bei diesen Personen nicht angewendet werden.

Kontaindikationen

Die Anwendung von PeriCare® Periodontal Paste ist kontraindiziert:

- wenn die vorgeschriebene Anwendungstechnik nicht möglich ist
- bei erwiesener Allergie gegen Bestandteile von PeriCare® Periodontal Paste

Dosierung und Art der Anwendung

- Lokalanästhesie des betreffenden Gebietes, sofern erforderlich
- Gründliche Kürettage des Wurzelzements und der umgebenden Zahnfleisch- bzw. Knochentaschenwand
- Spülung der Taschen und Knochenhöhlen mit empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Die Kanüle der PeriCare® Spritze wird nun bis zum Taschenboden geführt und die Tasche druckfrei aufgefüllt, bis die Suspension aus der Zahnfleischtasche herausquillt, Überschuss entfernen.
- Je nach Schweregrad eventuell zwei oder drei Applikationen mit jeweils einer Woche Abstand
- Nach Verwendung des Materials ist die Spritze mit dem dafür vorgesehenen Verschluss wieder zu verschließen. Eine Kanüle als Verschluss sollte nicht verwendet werden, da es zum Austrocknen der Suspension in der Spritze führen könnte bzw. es zu einer Carbonatbildung kommen könnte, die den notwendigen pH-Wert senken würde.

Wichtige Hinweise

- Bei Kontakt mit den Augen sind diese mit viel Wasser zu spülen und es ist gegebenenfalls ein Arzt zu konsultieren. Bei versehentlichem Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Bei Irritationen der Zahnfleischtasche mit Kochsalzlösung sauber spülen, bevor PeriCare® Periodontal Paste erneut appliziert wird.
- Voraussetzung für den Erfolg der Behandlung ist eine gründliche Einweisung des Patienten in Sachen Mundhygiene.
- Vor der ersten Behandlung muss der Patient eine sorgfältige Putztechnik erlernen.
- Zahnseide, Interdentalbürsten und Bass-Methode sollte der Patient anwenden.
- Belagfreies Gebiss ist die Voraussetzung zum Erfolg.

Wechselwirkungen

Bei Defekten, die mit Wasserstoffperoxid vorgespült wurden, darf PeriCare® Periodontal Paste nicht angewendet werden, um die Bildung von Calciumperoxid zu verhindern.

Besondere Hinweise

- Die Haltbarkeit von PeriCare® Periodontal Paste beträgt zwei Jahre ab Herstellungsdatum, wenn die Lagerung vor direkter Lichteinstrahlung geschützt und nicht zu kühl bei Raumtemperatur (15°C - 25°C) erfolgt. Unsachgemäße Lagerungsbedingungen führen zu einer Verkürzung der Haltbarkeit des Produktes und können die Produkteigenschaften beeinträchtigen. PeriCare® Periodontal Paste ist nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr zu verwenden.
- Die Chargennummer (LOT-Nr.) sollte bei jedem Vorgang, der eine Identifikation des Material verlangt, angegeben werden.
- Die Merz Dental Medizinprodukte werden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Für die Anwendung der von uns gelieferten Produkte sind unsere wörtlichen und/oder schriftlichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach derzeit bestem Wissen gegeben. Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien jedoch nicht davon, das betreffende Produkt auf seine Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck zu prüfen. Da die Anwendung der Merz Dental Produkte ohne unsere Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in der Verantwortung des Anwenders. Merz Dental gewährleistet die Qualität des betreffenden Merz Dental Medizinproduktes entsprechend bestehender Normen sowie entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen festgelegten Standards.

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Eigenschaften

PeriCare® Periodontal Paste unterstützt schonend die natürlichen Heilungsvorgänge, ist sehr gut verträglich und hat eine positive Auswirkung auf die natürliche Geweberegeneration.

Die Produkteigenschaften basieren auf Einhaltung und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung.

Packungsgröße

2 x Calciumhydroxid-Suspension à 1 ml
10 Pastenkanülen

REF

1060005

Stand der Information: Oktober 2015



Merz Dental GmbH

Kieferweg 1 24321 Lütjenburg, Germany

Tel + 49 (0) 4381 / 403-0

Fax + 49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485

CE 0482