



Wax Spacer

- ▶ patentado por:
Prof. Dr. Dr. Arnim Godt & TPD Daniel Schweizer
- exclusivamente para MERZ DENTAL

Wax Spacer

Configuración de diagnóstico intraoral para grabación neurocéntrica.

Wax Spacer es una cera de impresión fisiológica para determinar alturas oclusales predefinidas. Le permite registrar con precisión la posición exacta de la mandíbula con respecto al maxilar superior. El inserto (Spacer), resistente a la mordida, incorporado en la pared de cera garantiza, ya en la definición de la relación maxilar, el registro de la elevación oclusal deseada y una distancia interoclusal constante. Es el propio paciente quien establece la situación de la relación transversal y sagital de los dos arcos a la altura oclusal esperada.

Indicaciones / Campos de aplicación


- Placas de oclusión
- Cera para el registro oclusal adaptado
- Placas para la elevación de la masticación
- Uso en la medicina del sueño
- Aparatos de ortodoncia

Durante el registro de arcos maxilares con dientes naturales o protésicos, el espaciador, Spacer, asegura que el paciente no pueda apretar los dientes en la posición cerrada habitual, sino solo hasta el tope insertado (spacer). Esto excluye el contacto entre las cúspides.


Características y Beneficios

- Altura oclusal definida
- Facilidad de uso
- Resultados constantes
- Posición definida de la mandíbula
- Control visual de la profundidad de mordida mediante cambio de color

Los precontactos se excluyen con el espaciador (Spacer). De esta forma, se determina la relación cúspide-fosa teniendo en cuenta el complejo discocondilar manteniendo la altura definida.

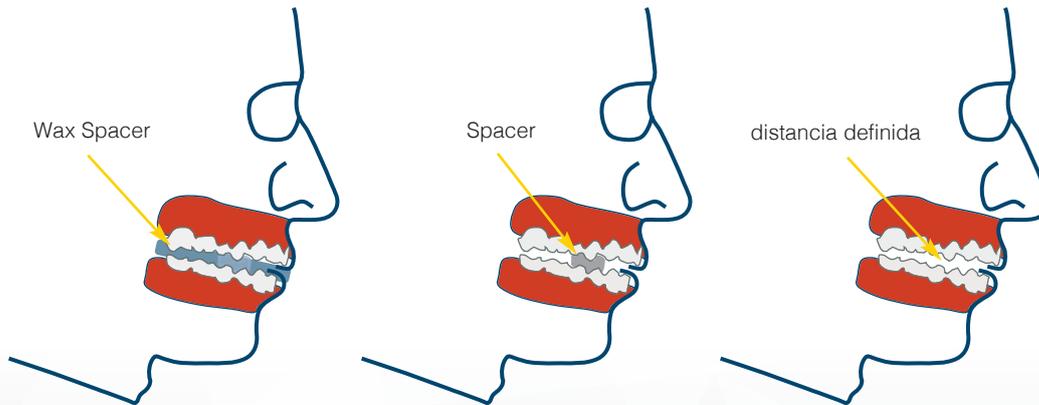


Wax Spacer

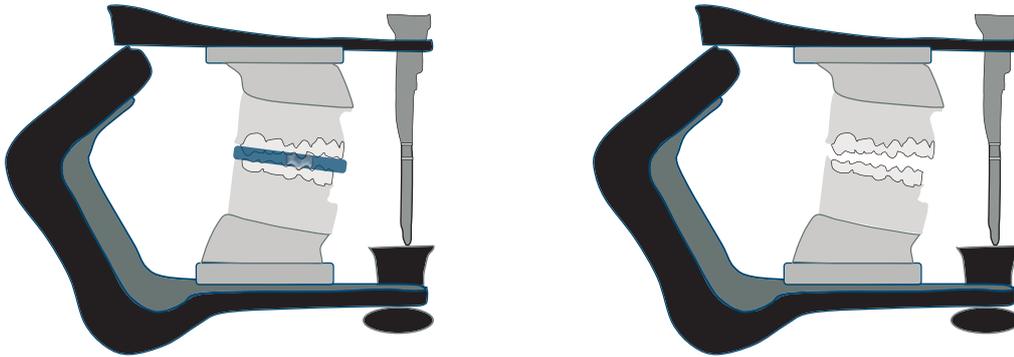


Wax Spacer - Espaciador de cera - según el Prof. Godt & TPD Schweizer

- Cera de impresión fisiológica para la terapia de placa, medicina del sueño y ortodoncia para determinar la distancia interoclusal con una altura oclusal definida (1 mm, 2 mm, 3 mm).
- Con Wax Spacer se establece una elevación de masticación definida sin tener que realizar la complicada medición de la rotación de la articulación maxilar.


Posición del inserto resistente a mordidas (espaciador)

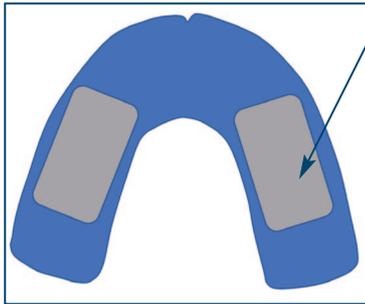

Azul oscuro 1 mm

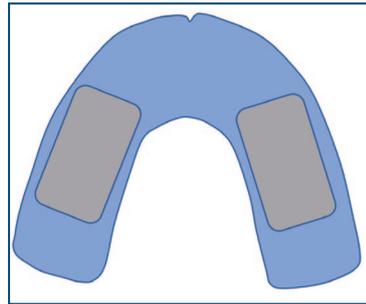

Azul medio 2 mm

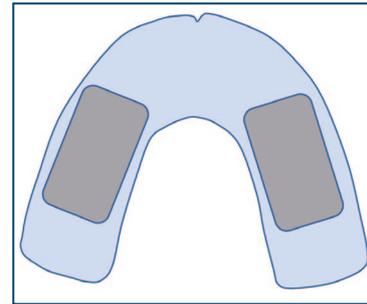

Azul claro 3 mm

- El inserto (Spacer), incorporado en el borde de cera y resistente a la mordida, garantiza una distancia interoclusal constante cuando se aprietan los dientes.

Wax Spacer

- Wax Spacer está disponible en diferentes espesores (codificados por colores) para diferentes alturas. De esta forma es posible garantizar un posicionamiento exacto de la mandíbula en la posición terapéutica a alcanzar.
- Wax Spacer es una cera de impresión fisiológica confiable para registrar la posición de la articulación maxilar, con diferentes distancias entre las dos arcadas dentales.

Envases

REF

- 1 mm 20 x  1030230
- 2 mm 20 x  1030231
- 3 mm 20 x  1030232



Wax Spacer

Merz Dental GmbH Kieferweg 1 24321 Lütjenburg, Germany Tel +49 (0) 4381 / 403-0 info@merz-dental.de

www.merz-dental.de

1092445/2020-11/es

Merz Dental cuenta con la certificación EN ISO 13485 y, por lo tanto, ofrece la seguridad y las ventajas de un sistema de gestión de calidad orientado al futuro.

Bajo reserva de errores, incluida de impresión